

Vandtæt, transparent og hurtigtørrende
flydende plaster, som er let at anvende



Flydende plaster som er let og hurtig at anvende

OPSITE Spray er en transparent og hurtigtørrende forbindelse som er let og hurtig at anvende. Filmen yder god beskyttelse til mindre, tørre og overfladiske sår. OPSITE Spray er permeabel for vanddamp og luft, derfor kan huden ånde normalt, hvorfor hudmaceration undgås samtidig med at den effektive bakteriebarriere bibeholdes.

Fordele

Vandtæt

Hudområdet kan vaskes / bades uden at forbindelse eller sår beskadiges.

Elastisk og smidig

Filmen forbliver intakt selv på hudområder, der ofte udsættes for stræk, som fx. knoer, knæ etc.

Indikationer

OPSITE Spray kan anvendes til alle typer mindre, tørre sår, men i særdeleshed til:
Mindre snitsår og hudafskrabninger.
Over tørre suturer.
Omkring dræn og ved ekstern ortopædisk fiksatoren.
Efter fjernelse af suturer.
Over vaccinationsområder.
Profylaktisk i forbindelse med badning og ved risiko for fx. fodsvamp.
Revner/fissurer på hænder og fødder.

Forholdsregler

Undgå inhalering. Anvendes i velventileret rum. Undgå øjenkontakt. Sprøjt ikke på åben ild eller gløder. Trykbeholder: Beskyttes mod direkte sollys og må ikke udsættes temperaturer højere end 50°C. Må ikke brændes eller punkteres selv efter brug. Holdes uden for børns rækkevidde. Er ikke beregnet på brug sammen med medicinske præparater. Kun til udvortes brug. Holdes væk fra antændningskilder - ingen rygning. Rødme kan forekomme når brugt sammen med jodopløsning og dækket med lukkende forbindelse. Ved hudtransplantation er det nødvendigt at tilstrækkeligt af det transplanterede område forbliver uden spray for at tillade tilstrækkelig drænage af væske.

Brugsanvisning

Applikation:

Vend spray-dåsen på hovedet og dæk såret jævnt - afstanden skal være mindst 15cm. Resultatet bliver bedst, hvis man applikerer flere tynde lag.

Fjernelse:

Filmen kan trækkes af, når den er helt tør, eller den kan sidde til den bliver stødt af sig selv. Alternativt kan den fjernes med et klæbestofopløsende middel.

Kontra-indikation

Må ikke bruges sammen med plastik IV produkter.
Må ikke bruges på børn under 18 måneder.
Dette produkt indeholder ikke CFC.



Produktsortiment

Varenr.	Beskrivelse	Antal pr. karton
66004979	100 ml	12 stk
66004980	240 ml	12 stk

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Danmark

T 45 45 80 61 00
F 45 45 80 61 51

™Trademarks of Smith & Nephew
6761/OPSITE/SPRAY/SS/GLOBAL/0404/V2